

AllStar[®]
PRO




SNABBGUIDE



Du har just blivit ordinerad insulin från Sanofi i flergångspennan AllStar PRO.

I denna snabbguide hittar du information om hur du använder din AllStar PRO. Mer utförlig information finner du i den bruksanvisning som följer med din AllStar PRO förpackning. Du kan även ringa 020-52 68 87 och få svar på dina frågor om insulinpennor från Sanofi.

AllStar PRO och dess delar

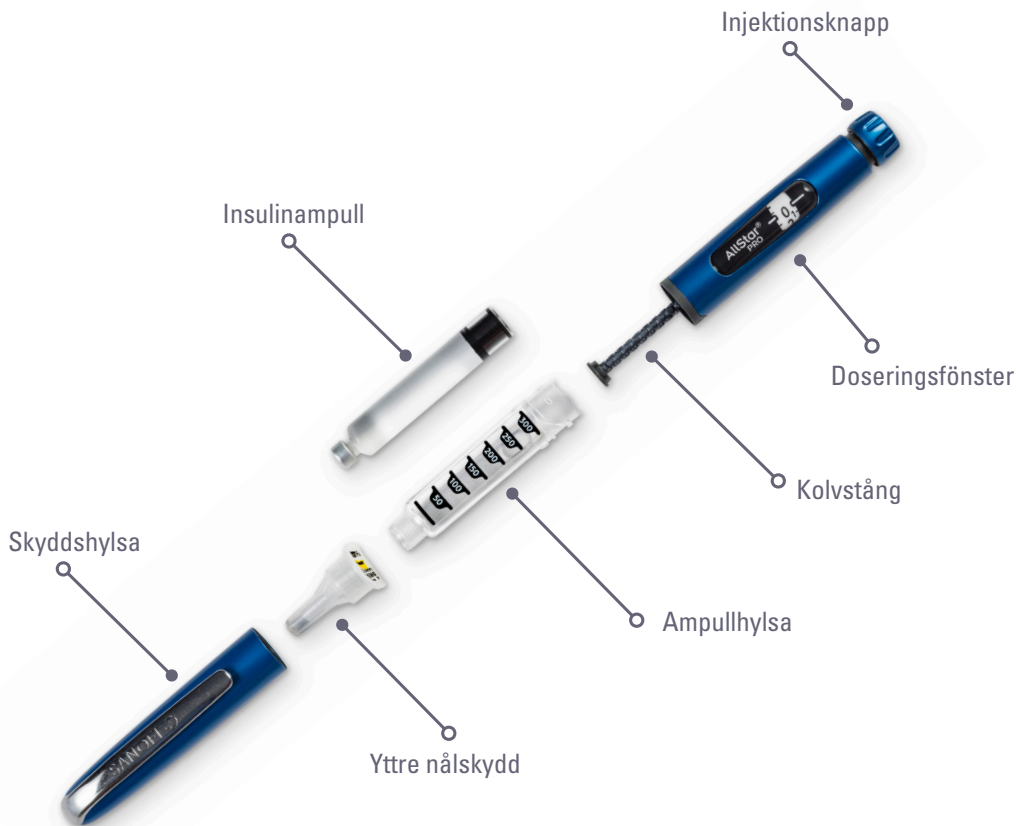

Varje AllStar PRO innehåller 80 enheter insulin.

Så här börjar du

- 1 Tag av skyddshylsan. Skruva loss ampullhylsan från pennkroppen. Sätt i en ny cylinderampull i ampullhylsan.



- 2 Kolvstängen trycks in när ampullhylsan skruvas fast.



- 3 Skruva tillbaka ampullhylsan tills den "klickar" fast. Se till att kontrollmarkeringarna pekar mot varandra.



4 Sätt på en nål rakt på pennan. Skruva eller tryck på nålen beroende på vilken nål du använder.




Gör ett säkerhetstest inför varje injektion

5 Välj dosen 2 enheter genom att vrida dosväljaren. Tag av yttre och inre nålskyddet.



6 Håll pennan med nålen uppåt. Tag bort eventuella luftbubblor genom att knäppa med fingret på insulin-behållaren.

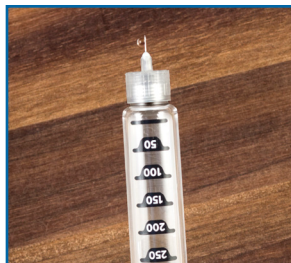

7 Tryck in injektionsknappen hela vägen in. Kontrollera att insulin kommer ur nålspetsen och att dosfönstret visar "0".

Ställ in dosen och injicera

- 1 Ställ in den önskade dosen. Vrider du förbi den enhet du skall injicera, är det bara att vrida tillbaka till rätt enhet.



- 2 Injicera din dos så som din diabetessköterska eller läkare har lärt dig. Stick in nålen i huden och tryck in injektionsknappen ända ner till botten. Under tiden du injicerar räknar dosfönstret ner till "0".



3

Håll kvar trycket på injektionsknappen i nedtryckt läge medan du räknar till 10. Drag därefter ur nålen.



Efter att du injicerat

4

Sätt på det yttre nålskyddet och håll i ampullhylsan när nålen tas bort. Kasta nålen som du har blivit anvisad. Sätt på skyddshylsan på din AllStar Pro och förvara den säkert.



OBS!

Avlägsna alltid nålen efter en injektion och förvara AllStar Pro utan nål. Detta hjälper till att förebygga nedsmutsning, luftbubblor och insulinläckage.

Tips och råd

Före användning

- Sätt alltid fast en ny nål inför varje användning.
- Kontrollera alltid märkningen på insulinet före användning för att säkerställa att du har rätt sorts insulin.

Vid användning

- Använd aldrig en cylinderampull som är skadad.
- Använd aldrig AllStar Pro om den är skadad eller ej fungerar korrekt.
- Om du använder olika sorters insulin bör du ha olika färg på pennan för varje insulin.

Kan du inte ställa in önskad dos, kontrollera att det finns tillräckligt med insulin i cylinderampullen. Har du inte tillräckligt med insulin kvar i cylinderampullen kan du välja mellan att:

- injicera vad som finns kvar i cylinderampullen och komplettera din dos med en ny cylinderampull.
- eller använd en ny cylinderampull för att injicera hela dosen. Vrid aldrig doseringsknappen med våld.

När insulinet börjar ta slut kan du se på cylinderampullens graderade skala ungefär hur mycket insulin som finns kvar. OBS! använd ej för exakt dosavläsning.

Förvaring av din AllStar Pro

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Om cylinderampullen förvaras kallt (t ex i kylskåp), ta ut den 1-2 timmar innan du injicerar för att den ska värmas upp.
- När cylinderampullen börjat användas kan den användas i upp till 4 veckor under normala omständigheter.
- Vid kassering av AllStar Pro, gör som du blivit instruerad av din sjukvårdspersonal och enligt lokala föreskrifter.
- Skydda din AllStar Pro från direkt solljus.
- Se insulinets bipacksedel för ytterligare information om förvaring.

Behöver du göra rent utsidan av din AllStar Pro kan du torka av den med en fuktig trasa. Blöt eller tvätta inte din AllStar Pro.

Egna anteckningar

Frågor om våra diabetesprodukter:

020-52 68 87

Mer information om diabetes hittar du på www.insulin.se

Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se

Läs bipacksedeln noggrant!



Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se

Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com